



Ortopedie Baldinelli dal 1860

VIA FRANCESCO BARACCA 1/B, C/O FAL.
O'WOOD UDINE (UD)

Tel. 0432/680824

Dal Lunedì al Venerdì 8:30-12:30 14-17:30

PIAZZA IMPERATORE TITO, 8 MILANO
(MI)

Tel. 02 55011019

Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

C.SO PORTA VIGENTINA, 23
MILANO (MI)

Tel. 02 58324388

Dal Lunedì al Venerdì 8-19
Sabato 9-19

VIA CESARE CORRENTI, 24
MILANO (MI)

Tel. 02 58111170

Dal Lunedì al Sabato 10-14 15-19

VIA LIGURIA, 4 - PIEVE EMANUELE
MILANO (MI)

Tel. 02 90427262

Dal Lunedì al Venerdì 10-14 15-19

VIA CORNIGLIANO 89/R GENOVA (GE)

Tel. 010/6042150

Dal Lunedì al Venerdì 9-13 15-19

VIALE GIUSEPPE GARIBALDI, 39 LA
SPEZIA (SP)

Tel. 0187733174

Dal Lunedì al Sabato 9-19

VIA ROCKEFELLER 34 SASSARI (SS)

Tel. 079 217637

Dal Lunedì al Venerdì 8:30-13 15:30-19



Cerotti autoriscaldanti Gibaud

Categoria: Cura del corpo

Riferimento: DUA-4401X

Confezione da 3 cerotti
autoriscaldanti

Applicabile sulla schiena e
sull'addome

Dr. Gibaud Thermo può alleviare il
dolore rilasciando calore,
rilassando e decongestionando la
parte interessata

Prezzo: 5.9 €

Descrizione

CARATTERISTICHE

Rilascia calore costante per circa 8 ore

Composto di un materiale soffice e piacevole al tatto contiene elementi naturali quali polvere di ferro, carbone e sale che a contatto con l'ossigeno dell'aria sviluppano calore.

Utilizzabile come ricarica per la cintura Dr. Gibaud Thermo

POSIZIONAMENTO

Pulire e asciugare con cura la zona interessata.

Quando si è pronti per l'uso, estrarre il cerotto dall'apposita busta di protezione e rimuovere la pellicola protettiva. Posizionare il cerotto sull'area dolente facendo attenzione che aderisca con tutta la sua superficie alla cute. Il cerotto autoriscaldante può impiegare circa 30 minuti per raggiungere la temperatura prevista.

Nel caso di utilizzo come ricarica, rimossa la pellicola protettiva, inserire il cerotto nell'apposita



dal 1860
Ortopedie Baldinelli

**VIA FRANCESCO BARACCA 1/B, C/O FAL.
OWOOD UDINE (UD)**

Tel. 0432/680824

Dal Lunedì al Venerdì 8:30-12:30 14-17:30

**PIAZZA IMPERATORE TITO, 8 MILANO
(MI)**

Tel. 02 55011019

Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

**C.SO PORTA VIGENTINA, 23
MILANO (MI)**

Tel. 02 58324388

Dal Lunedì al Venerdì 8-19
Sabato 9-19

**VIA CESARE CORRENTI, 24
MILANO (MI)**

Tel. 02 58111170

Dal Lunedì al Sabato 10-14 15-19

**VIA LIGURIA, 4 - PIEVE EMANUELE
MILANO (MI)**

Tel. 02 90427262

Dal Lunedì al Venerdì 10-14 15-19

VIA CORNIGLIANO 89/R GENOVA (GE)

Tel. 010/6042150

Dal Lunedì al Venerdì 9-13 15-19

**VIALE GIUSEPPE GARIBALDI, 39 LA
SPEZIA (SP)**

Tel. 0187733174

Dal Lunedì al Sabato 9-19

VIA ROCKEFELLER 34 SASSARI (SS)

Tel. 079 217637

Dal Lunedì al Venerdì 8:30-13 15:30-19

tasca della cintura termoattiva Dr. Gibaud Thermo.

Utilizzare il prodotto per almeno 8 ore.

Dopo l'utilizzo e il suo raffreddamento, il cerotto autoriscaldante può essere smaltito come rifiuto urbano.

Indicazioni

Stati dolorosi dovuti ad affaticamento, tensione muscolare, distorsioni, stiramenti e dolori articolari

